



- Extra großes Format (28 x 28 cm)
- Hochwertiges und besonders reißfestes Vlies (60 g/m<sup>2</sup>)
- Ein Tuch für einen ganzen Raum
- Trockene Tücher – geeignet für jede Innocid® Tränkflüssigkeit

### Warum Sie Innocid® DW-i 70p anwenden

Bei Ihren täglichen Desinfektions- und Reinigungsmaßnahmen verwenden Sie gerne Desinfektionstücher, denn sie sind besonders praktisch bei schwer zugänglichen Stellen wie Türgriffen, Schubladen, aber auch für den Rest des Raumes. Ein hochwertiges Tuch, mit dem Sie viele Flächen, oder sogar den gesamten Raum desinfizieren können, wäre perfekt für Sie.

Die Innocid® DW-i 70p Desinfektionstücher BIG PREMIUM mit ihrer besonders hohen Vliesqualität wurden als Antwort auf diese Frage entwickelt. Benutzen Sie ein BIG PREMIUM Tuch für einen Raum, und ersetzen Sie damit 15 bis 20 CLASSIC Tücher. Wählen Sie dazu das Desinfektionsmittel Ihrer Wahl, um die trockenen Innocid® DW-i 70p Desinfektionstücher BIG PREMIUM zu tränken.

### Wo Sie Innocid® DW-i 70p anwenden

Verwenden Sie Innocid® DW-i 70p Desinfektionstücher BIG PREMIUM für nicht-invasive Medizinprodukte und Oberflächen aller Art – wählen Sie dazu je nach Anforderung das passende Innocid® Desinfektionsmittel.

### Wie Sie Innocid® DW-i 70p anwenden

1. Öffnen Sie die verschweißte Verpackung von Innocid® DW-i 70p Desinfektionstücher BIG PREMIUM. Verwenden Sie diese einzeln oder aus dem praktischen Spendereimer Quattro.
2. Tränken Sie die trockenen Innocid® DW-i 70p Desinfektionstücher BIG PREMIUM mit 1-1,5 Liter der Desinfektionsmittellösung Ihrer Wahl. Wir empfehlen dafür aus Kompatibilitätsgründen Produkte der Innocid® Produktreihe.
3. Ziehen Sie bei Verwendung eines Spendereimers das erste Tuch aus der Rollenmitte durch den Deckel der Dose.
4. Wischen Sie mit dem Tuch über die zu desinfizierenden Stellen, und benetzen Sie diese Stellen dabei vollständig. Die Einwirkzeiten richten sich nach der gewählten Desinfektionslösung, mit der die Tücher getränkt wurden.


Verbrauchen Sie getränkte Tücher innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag der Tränkung.

### Die technischen Daten von Innocid® DW-i 70p

Tuchmaterial: ca. 60 g/m<sup>2</sup>  
Maße des Einzeltuches: ca. 280 x 280 mm



### Wie Sie Innocid® DW-i 70p tränken

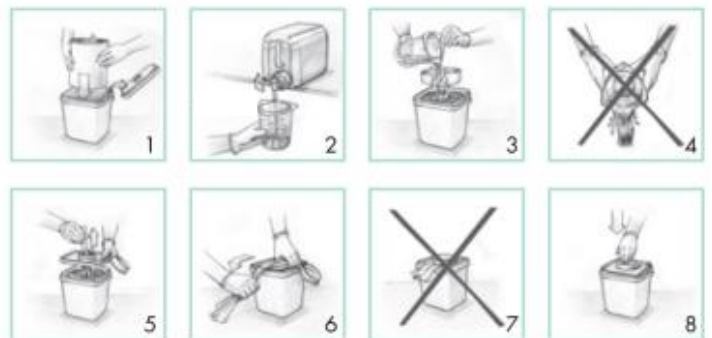

### Innocid® DW-i 70p ist erhältlich als

<b>Ref.</b>	<b>Einzelprodukt</b>
97201	Spenderdose, 75 Tücher
97202	Refill, 75 Tücher
97203	Spenderdose, leer