



## Innocid™ Orange Cleaner

Der starke Reiniger



- Sehr hohe Reinigungskraft
- Hervorragende Fettlöseigenschaften
- Angenehmer Duft (klare Orangenöle)
- Vielfältiger Einsatzbereich

### Warum Sie Innocid™ Orangecleaner anwenden

Der Innocid™ Orange Cleaner ist eine Spezialreinigungslösung für Labor, Praxis und Haushalt mit natürlichen Orangenölen zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Verunreinigungen. Sowohl als Fettlöser, als auch als Ihr starker Reiniger ist er nahezu universal einsetzbar. Der angenehme Duft von Orangen macht den Innocid™ Orangecleaner zu einem vielseitig einsetzbaren Helfer.

### Wo Sie Innocid™ Orangecleaner anwenden

Verwenden Sie den Innocid™ Orangecleaner zur Reinigung von Flächen und Instrumenten bei hartnäckigen Verschmutzungen (z.B. Silikonen, Alginaten, Fetten, Blutresten u.a.). Auch Edelstahl und andere Oberflächen können mit dem Innocid™ Orangecleaner behandelt werden. Achten Sie bitte auf die starke Reinigungswirkung und verwenden Sie den Orangecleaner nicht auf Kunststoffen. Bei lackierten Oberflächen bitte vorher an geeigneter Stelle auf Verträglichkeit testen.

### Wie Sie Innocid™ Orangecleaner anwenden

Dosieren Sie bitte sparsam den Innocid™ Orangecleaner auf ein Tuch (z.B. Innocid™ DW-i 70p PREMIUM-Tücher) und reinigen Sie die Oberfläche der Fläche oder des Instrumentes gründlich. Bei einer lackierten Oberfläche testen Sie bitte vorher die Materialverträglichkeit und verwenden sie den Innocid™ Orangecleaner nicht auf Kunststoffen.

### Innocid™ Orangecleaner ist erhältlich als

Ref.	Einzelprodukt	Menge
9001	250ml Flasche	30
9002	250ml Spray	16

### Was Innocid™ Orangecleaner enthält

Orangeroterperne

### Innocid™ Orangecleaner am besten in Kombination

...mit RSD-i 50 Sprüh- und Wischdesinfektion MAX, DW-i 70p PREMIUM- Tücher trocken, ID-ic 30 Instrumentendesinfektion BASIS Konzentrat